

# Postoperatives Management

Schuhmodelle und Hilfsmittel für den Fuß



**DARCO**

Das postoperative Management beginnt unmittelbar nach der Operation. Es gilt für die Dauer des Krankenhausaufenthaltes des Patienten und wird mit der Entlassung fortgesetzt.

DARCO hat seit vielen Jahren sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Schuhmodellen und Hilfsmitteln für Fuß und Sprunggelenk gelegt, die das postoperative Management begleiten und unterstützen.

Nach Operationen am Fuß sowie bei Erkrankungen aufgrund von Fehlstellungen stellt sich die Frage nach dem „richtigen Schuh“. Höchstes Ziel ist die Stabilisierung des Fußes nach der Operation, die Förderung des Heilungsverlaufes sowie die Wiederherstellung der Mobilität des Patienten.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Anwendungsgebiete und Handhabung verschiedener Schuhmodelle, flexibler Sohlensysteme und Hilfsmittel von DARCO informieren. Die folgenden Produkte sind nur ein Auszug aus unserem Sortiment.

Unser komplettes  
Produktsortiment  
finden Sie unter  
**[www.darco.de](http://www.darco.de)**  
und in unserem  
Gesamtkatalog.

# Der DARCO Verordnungsleitfaden jetzt im handlichen Format: Alle orthopädischen Hilfsmittel und Schuhe im Überblick

Zusätzlich haben wir einen Verordnungsleitfaden erstellt, um schnell und einfach das passende DARCO Hilfsmittel und die entsprechende Hilfsmittelnnummer zu finden. Mit dem Leitfaden geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Produkte und ermöglichen ein zeiteffizientes Verordnen.



Fordern Sie den DARCO Verordnungsleitfaden bei uns an:

Telefon 088 07.92 28-0  
info@darco.de


# Relief Dual®

## Fußteilentlastungsschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5072

### Weg vom Vorfuß-Plateau!

Die Vollbelastung mit einer flachen Schuhversorgung wird immer mehr zum Standard. Eine in die Sohle eingearbeitete, durchgehende, rigide Brandsohle ist das herausragende und wichtigste Merkmal. Es entstehen während der Schrittabwicklung deutlich reduzierte Fußgelenkbewegungen, welche zu einer verbesserten Druckumverteilung am Fuß führen.

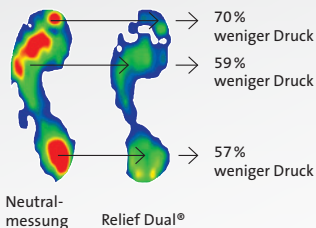

# Druckumverteilung mit den Innensohlen von DARCO

4 Spezialsohlen – viele Anwendungsmöglichkeiten

## Zuverlässige Druckentlastung mit speziellen Einlegesohlen für unsere orthopädischen Schuhe

Akutfälle rund um den Fuß verlangen nach einer raschen Versorgung mit dem passenden Sohlensystem. Aber auch bei temporären Anwendungen bis zur endgültigen Schuhversorgung mit individuell gefertigter Fußbettung kommt es auf eine orthopädisch korrekte Lösung an. Mit den vier verschiedenen Sohlen aus dem DARCO Portfolio kann also gezielt pro Patient und Indikation versorgt werden.



- 1 PegAssist® Insole Waben-Einlegesohle
- 2 Puzzle Insole® Modulare Innensohle
- 3 Relief Contour Insole Weichbettungseinlegesohle
- 4 PegContour® Insole Waben-Weichbettungseinlegesohle

1 2 3 4 Abrechnungsvorschlag 31.99.99.0999  
(Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag  
bei Verbandschuhen)

1 2 3 Abrechnungsvorschlag 23.99.99.0001  
(Zubehör bei Orthesen)

3 4 Abrechnungsvorschlag 08.03.02.1000  
(Weichpolsterbettungseinlagen)

## TAS® (Toe Alignment Splint) Hallux Valgus Zehenschiene

Hilfsmittelnummer 23.01.01.0008

### Redressierender Verband nach Hallux Valgus Operationen

Die TAS® Zehenschiene stellt einen postoperativen redressierenden Verband dar, welche anstelle von Tapeverbänden eingesetzt wird. Sie erlaubt eine Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position, was das Operationsergebnis maßgeblich bestimmt.



## MECRON ReadyDressment Strips Elastische Stabilisierungszügel

Als Sprechstundenbedarf (Praxis)  
bzw. Verbandsmaterial (Klinik) zu  
beziehen.

### Ideal zur Stabilisierung operierter / korrigierter Zehen

Sofort einsatzbereite, elastische  
und vorgeschchnittene Tapestreifen,  
die Sie direkt nach einem minimal-  
invasiven oder offenen Eingriff verwenden  
können. Lästiges Zuschneiden entfällt. Ein Produkt,  
das mittlerweile sehr häufig eingesetzt wird.



## Die Two-in-One Lösung: Lagerungsschiene sowie Walker-Alternative

### Relief Insert® Walker Unterschenkel-Fußorthese

Hilfsmittelnummer 23.06.01.0070

#### Immobilisierung des Fußes bei gleichzeitiger Mobilisierung des Patienten

Der neue modulare Walker von DARCO,  
ein Novum auf dem Hilfsmittelmarkt:  
Zum einen eine Lagerungsschiene  
zur Spitzfußprophylaxe und  
zum anderen eine auf- und  
abrüstbare Walker-Alternative.



**Relief Insert®**  
Lagerungs-  
schiene



**Relief Contour  
Insole**  
Weichbettungs-  
einlegesohle



**Relief Dual®**  
Fußteilent-  
lastungsschuh



Haben Sie Fragen? Wünschen Sie einen Termin mit unserem Außendienst, ein Ärztemuster oder eine Schulung?

Melden Sie sich bei uns.  
Unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne.